

取扱説明書

Version 1.0.t

翌朝検査!

「二日酔いアルコールチェッカー」



型番：CHNDALCC

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	高さ111×幅35～53(吹き口含まず)×厚20(mm)
重量	36g(電池含まず、吹き口1個含む)
電源	単4電池(AAA)を2本使用
液晶	バックライト付きモノクロ液晶
スピーカー	ピープ音になるスピーカー内蔵
センサー	アドバンスセミコンダクターアルコールセンサー
検知範囲	0.00%~0.19%BAC(0.0~1.9g/l)
正確さ	-0.01%~+0.02% at 0.05% BAC
作業時間	ウォームアップ10秒、応答時間5秒以内
動作温度	5℃~40℃
内容品	本体、吹き口(5個)、日本語説明書

ご注意

- 1.本製品は簡易計測器であり測定結果はあくまでも目安です。運転や作業のご判断はご使用者の責任において行ってください。また測定結果の数値の正確さの保証はいたしません。
- 2.アルコールに対する反応は人によって異なります。数値が低く出ても体調に影響が出ている場合がございます。数値は過信せずご自身の体調の経過を確認してください。

⚠️ ご注意

- 本製品は簡易計測器です。本製品の表示する数値は目安としてご利用ください。
- 気温等により計測結果に誤差がでる場合がございます。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマサポートまでご連絡ください。

● 各部名称




吹き口の交換




【吹き口】は交換できます。外す際は吹き口を持ち、引っ張ってください。付ける際は押し込んでください。


● 電池を入れる

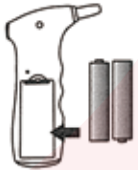

本体後ろ側の【電池ボックス】にアルカリ単4電池(別売り)を入れます。

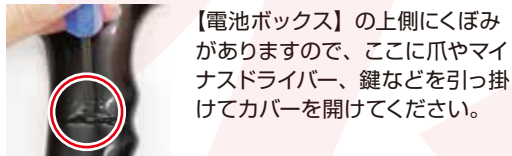

【電池ボックス】の上側にくぼみがありますので、ここに爪やマイナスイラストドライバー、鍵などを引っ掛けてカバーを開けてください。

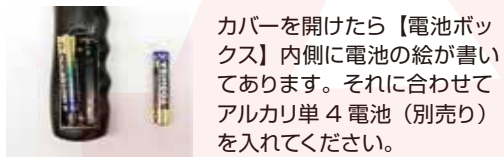

カバーを開けたら【電池ボックス】内側に電池の絵が書いてあります。それに合わせてアルカリ単4電池(別売り)を入れてください。

◆電池の残量が少ない場合

電池の残量が少ない場合【液晶】が点滅します。単4乾電池(別売り)2本を交換してください。

● 電源を入れる



電源ボタン

1.【電源ボタン】を1秒間押し続けると、ピープ音が一回鳴り、【液晶】が点灯します。



2."warm up"という文字が表示され、10から00までカウントダウンが開始されます。00になるまでお待ち下さい。

包装から最初に取り出すときや、長時間使用しなかった場合、センサーに汚れが付着し正しい計測ができない場合があります。そのような場合は2～3回ほど使用して、その後本測定をしてください。

● 計測する

1.ウォームアップが成功するとピープ音がなり"Blow"と表示され、計測モードになります。10から00までカウントダウンが開始されます。

2.【吹き口】を口でくわえ、最初の2秒間ほどは強く息をはき、その後は通常のパワーで3～5秒間ほど【吹き口】に息を吹き込んでください。



カウントダウン中に【吹き口】をくわえて息を吹き込んでください。



3.計測が終了しましたら液晶に結果が表示されます。

4.アルコール濃度のレベルが注意すべき値の場合、「Caution」マークが表示されます。0.02%BAC(or 0.2g/l)から0.05% BAC(or 0.5g/l)の場合表示。

5.アルコール濃度のレベルが危険な場合は、ピープ音が鳴り、「Danger」マークが表示されます。0.05% BAC(or 0.5g/l)以上の場合表示。

● 電源を切る

結果が約10秒間表示されると、「OFF」のマークが2～3秒間表示され、電源がオフになります。手で電源OFFにすることはできません。

● 計測について

- 飲酒後20分後の計測をお勧めします。
- 正確な結果を得るには、むやみやたらにテストを繰り返さないでください。
- 計測前に20分間は喫煙しないでください。
- 化学薬品を使用して本体を直接洗浄しないでください。
- 吹き口に液体を吹き込まないでください。
- 塗料、殺虫剤、アルコールなど、使用者の近くで薬剤を使用しないでください。
- 汚染された空気の密閉環境に置かないでください。