

どこでもあったかヒーター内蔵腰サポーター

取扱説明書

型番:UHTWAIWA

Version1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様


サイズ	幅880×高さ124×奥行5(mm)
重さ	73g
付属品	本体、バッテリーケース、日本語説明書
電源	USBから給電(1A以上推奨)
温度	低温:約50度 中温:約60度 高温:70度 ※最大温度は周りの環境により異なります。
消費電力	低温:4W 中温:6W 高温:8W
対応サイズ	ウエスト約66~120cm程度まで
パッケージサイズ	幅290×高さ55×奥行10(mm)
パッケージ重量	75g

⚠️ ご注意


- ※内容品に記載している以外の物は付属しません。
- ※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- ※低温やけにご注意ください。熱すぎると感じたらすぐにご使用をおやめください。
- ※小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方は目を離さないでください。
- ※分解しないでください。
- ※落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ※防水ではありません。
- ※異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたらすぐに使用をやめて弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- ※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●モバイルバッテリーに接続する

①ケーブルのカバーを外します。

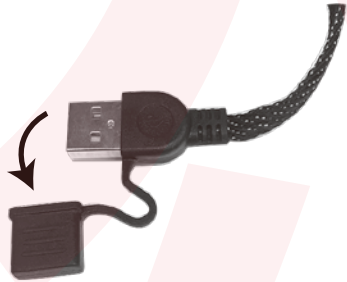

②モバイルバッテリー(別売)に差し込みます。

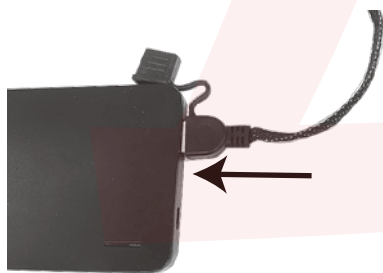


③バッテリーケースにバッテリーをセットします。




バッテリーは幅75×奥行116×高さ8mm程度のサイズを推奨しています。(伸縮するので多少サイズが大きくてもご使用いただけます)

バンド部にケースを通します。

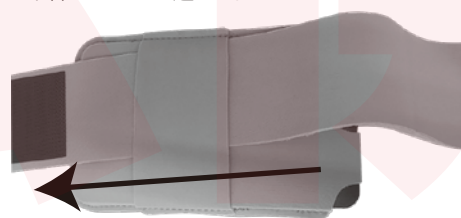


●使用方法

指マークのあたりにスイッチがあります。スイッチを3秒程長押しすると、赤く点滅し温度が上がります。5分ほどすると白く点灯します。(点滅は電源を入れた直後のみ)

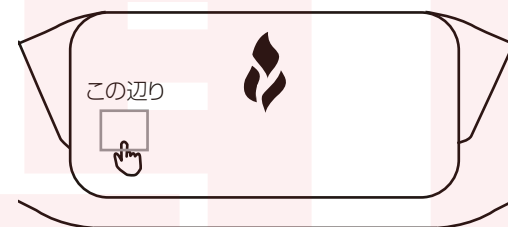

スイッチを押す毎に白(中温)→青(低温)→赤(高温)→白→青...と切り替わります。電源を切る時は、スイッチを長押しします。ランプが消灯し、電源が切れます。

温めたい場所(腰、もしくはお腹)にヒーター部分をあて、ぐるっとまわして、面ファスナーで留めます。あまりきつく巻きすぎないようにご注意ください。

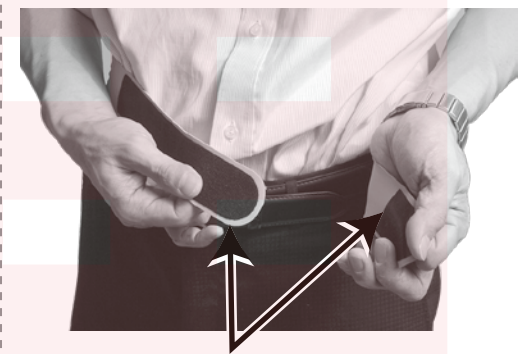

面ファスナーで長さを調整してください

※お手入れについて
本製品は防水ではありません。汚れた場合は、固く絞った布で、コード部等に触れないように拭き、その後乾いた布で水分を取るようして下さい。